


添付文書表示の主な変更箇所

現行表示品


【操作方法又は使用方法等】

(5) 眼内レンズをカートリッジ・眼内レンズ装着部(2本の溝)の上に設置する。


(6) カートリッジ・ウィングを半分程度閉じた状態にする。この時、光学部の両端部分がカートリッジ・ウィング内部の溝にはまっていることを確認する。

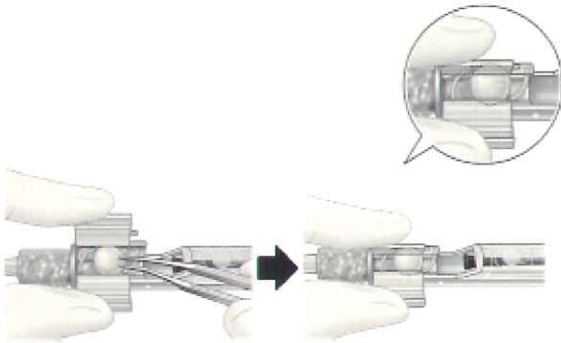

(7) カートリッジ・ウィングを半分程度閉じた状態のまま、鑷子で後方ループを光学部の上に乗せる。

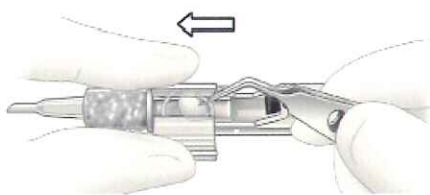


(8) カートリッジ・ウィングを半分程度閉じた状態のまま、鑷子で先行ループ先端を後方に向かって押し、先行ループをタッキングさせる。

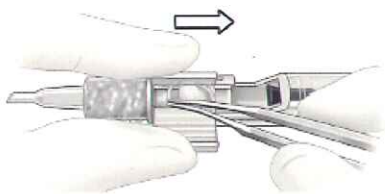


新表示品

【操作方法又は使用方法等】


(5) プランジャーを押し、ソフトパッドを所定の位置(カートリッジ・ウィング後方付近のライン)まで前進させる。

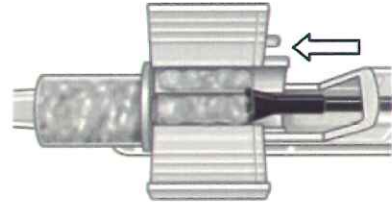

(6) 眼内レンズをカートリッジ・眼内レンズ装着部(2本の溝)の上に設置する。この時、光学部の両端部分がカートリッジ・ウィング内部の溝にはまっていることを確認する。

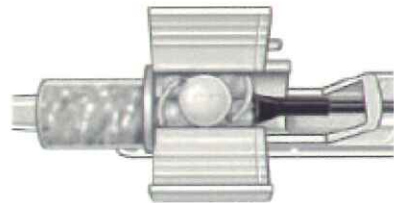

(7) 鑷子で先行ループ先端を後方に向かって押し、先行ループと後方ループをタッキングさせる。

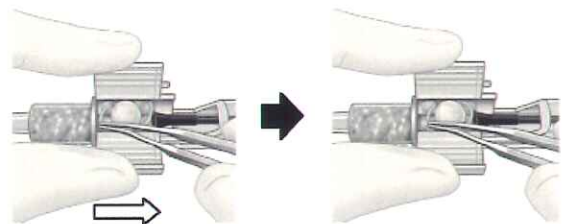

(8) カートリッジ・ウィングを閉じてロックさせる。この時、両方のループ(先行ループ、後方ループ)がタッキングしていることを確認するとともに、両方のループ(先行ループ、後方ループ)ならびにソフトパッドがカートリッジ・ウィングに挟まれていないことを確認する。

