

NEITZ

画期的なスタイルが
可能性を拡げます。



眼鏡フレーム式なので
片手が自由に使用できます。

今までにない、
軽い装着感を実現しました。

進化を続ける
LED検眼鏡

眼鏡フレーム式単眼倒像検眼鏡 ファンダスボーイ

- 従来の手持ち式単眼倒像検眼鏡では不可能だった強膜圧迫等の**手技が可能**です。
- 重さは**わずか60g**です。長時間の装着でも疲労感が軽減されます。
- スリムな照明と独自の多関節ヒンジで**ベストポジション**で眼底観察ができます。
- 電球色のLED照明により**違和感なく眼底観察**ができます。
- ヒンジのチルトアップダウンと**照明のON/OFFが連動**します。




フレームカラー：4カラーの中から、お好みの色を選べます。
■ ブラック ■ グレー ■ ブルー ■ レッド

日本製

製造販売届出番号：13B2X00131126401（一般医療機器 / 単眼倒像検眼鏡）
Patent No.3162586

LED 鏡筒の動き

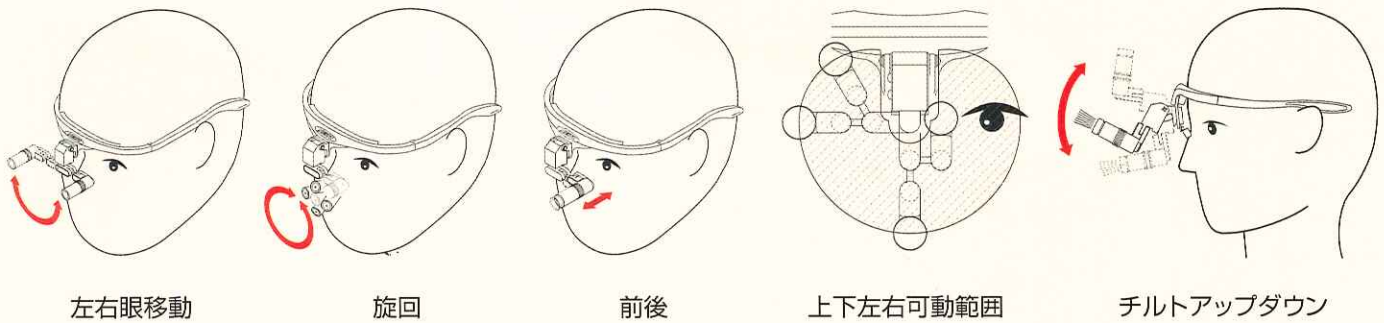

- 独自の多関節ヒンジにより多彩な照明ポジションが得られ、小瞳孔や周辺部観察に威力を発揮します。
- チルトアップダウンで LED 照明の ON/OFF が連動します。装着したままで、他の作業を行うときに便利です。

実使用例



外来での診察



手術室での処置（網膜復位術）

■ 写真提供：武蔵野赤十字病院
眼科部長 田中 俊一 先生

専用バッテリーパック（付属品）



- バッテリーパック式なので行動範囲が広がります。
- 繰り返し1500回^{※1}充電可能なNi-MH充電電池を内蔵しました。
- LEDによる省エネ効果により17時間連続点灯が可能^{※2}です。
- 充電はACアダプタのDCプラグを差し込むだけで簡単に行えます^{※3}。

仕 様

ファンダスボーイ本体	
光 源	3W型LED
光 源 寿 命	50000時間以上 ^{※4}
照 野	φ15～80mm 連続可変絞り（照明先端から500mmの位置）
照度の目安	50Lx～300Lx（中間）～600Lx（照明先端から500mmの位置）
質 量	本体装着部：約60g 本体総質量（コード含む）：約90g

専用バッテリーパック	
出 力	DC3.2V 0.3W（定電流 PWM 制御）
連続点灯時間	最大調光時：約10時間、中間位置時：約17時間
使用 充 電 池	ニッケル水素電池
充 電 時 間	約2時間半
充 電 池 寿 命	約1500サイクル ^{※1}
サ イ ズ	約72.5×65×20mm（突起含まず）
質 量	約140g
ACアダプター	AC100V-240V 50/60Hz 15VA

※1：バッテリーメーカーデータによる ※2：照度中間位置にて ※3：充電しながら使用することはできません ※4：LEDメーカーデータによる

オプション（別売品）



- 外付けフィルタ各種
レッド、イエロー、レッドフリー
コバルト、ディフューザー



- 非球面レンズ
ナイト非球面レンズ 20D
他メーカー取扱 14D、28D など

NEITZ

株式会社 ナイツ
〒162-0056 東京都新宿区若松町36-13
tel. 03-3204-2922 fax. 03-3204-2069
e-mail: dom@neitz.co.jp http://www.neitz.co.jp

● 代理店