


## シラスHD-OCT (モデル400 Basic)

モデル400の各種プログラムから臨床に有用な解析のみを搭載したベーシックタイプ。  
低価格を実現しました。

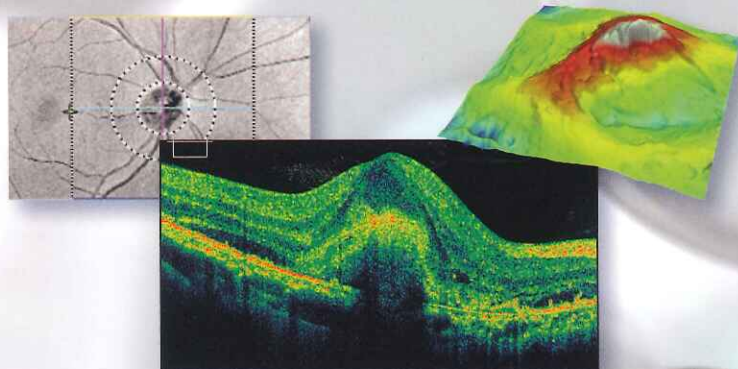

黄斑疾患・緑内障の診断から経過観察まで、  
シラスならではの定評のある各種解析を搭載!



シラスHD-OCT(モデル400 Basic) 認証番号:219AH8ZX00011000

### モデル400主要テクニカルデータ比較

|             | (モデル400 Basic) | (モデル400) |
|-------------|----------------|----------|
| 画像取得方式      | スペクトラルドメイン方式   |          |
| 黄斑部網膜厚正常データ | 無              | ○        |
| 黄斑部網膜厚変化解析  | 無              | ○        |
| 神経線維層厚正常データ | ○              | ○        |
| GPA(経過観察解析) | 無              | ○        |
| 視神経乳頭形状解析   | 無              | ○        |
| 3D画像構築      | ○              | ○        |
| 加算平均画像      | 無              | オプション    |
| 前眼部撮影       | 無              | オプション    |


シラスHD-OCT(モデル400 Basic)は、モデル400に含まれる黄斑部緑内障の各種解析プログラムの中から臨床に有用な解析のみを搭載したベーシックタイプで低価格を実現しました。

- 》 省スペース・コンパクト・L字型設計で設置場所を選びません。
- 》 画面上のアイコン・ボタンをクリックするだけの直感的操作。
- 》 スピーディーな画像取得と解析処理で多くのデータや情報が得られます。
- 》 黄斑部形態把握から緑内障の診断・経過観察に有用な情報を提供します。

## スキャンパターン・解析結果例

### 5Line Raster(黄斑部用)


約0.7秒内で5本を取得し、モデル400最高画質の画像が得られます。スキャン長・角度の変更も可能です。網膜の形態観察に有用です。

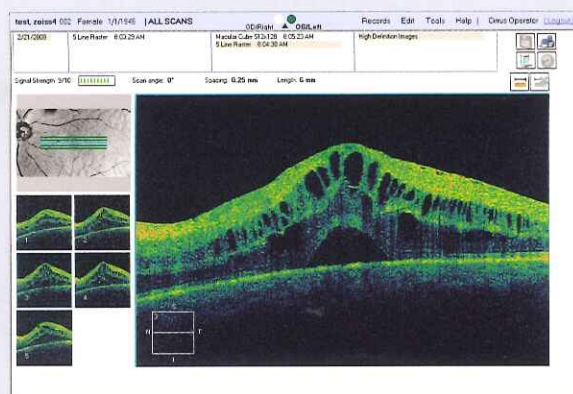

5ラインスキャン

### Macular Cube 512x128, 200x200(黄斑部用)



6mm四方を2秒内で取得し、黄斑部網膜厚の定量解析を行います。黄斑疾患のスクリーニング・経過観察に有用です。

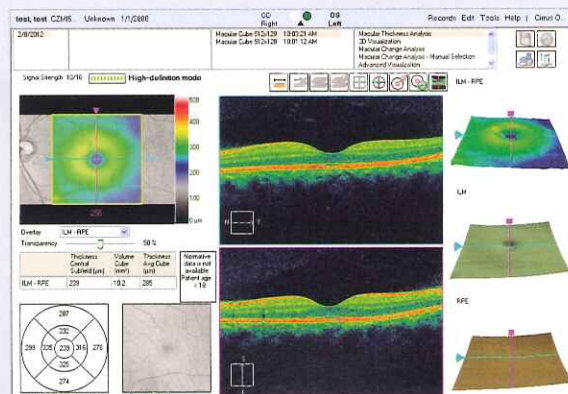

網膜厚カラーマップ、セグメンテーションマップ

### Optic Disc Cube 200x200(緑内障用)

視神経乳頭を中心に6mm四方を1.5秒内で取得します。緑内障診断・経過観察のための神経線維層厚の計測・正常データベースとの比較を行い、直感的なフォーマットで表示します。

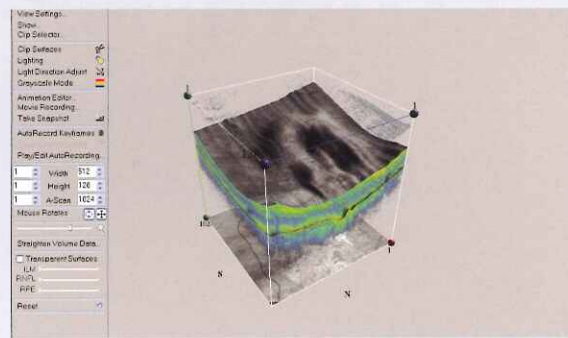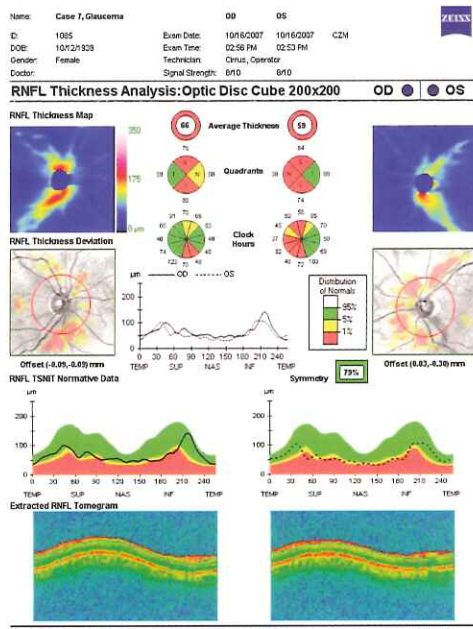

3D画像

### ハンフリー視野計とのコンビネーション解析

お持ちのハンフリー視野計\*とシラスを弊社データ管理・閲覧ソフト「FORUM」へ接続することで、ハンフリーの解析結果とシラスの緑内障解析結果を同一画面で表示でき、「構造と機能」を直感的に捉えます。

