

オールコードレスという新常識。



LiBERTiS
コードレス電動患者椅子リバティス

オールコードレスによる付加価値空間

美しい診療施設。

オールコードレスにより、これまでわずらわしかったケーブルがなくなり、美しい診療室を構築することが可能です。美観性が向上することで、より一層患者さまからのクリーンな印象があがることは間違いありません。
また、ケーブルレスのため、清掃もしやすく、いつでも美しい診療施設を保つことが可能です。

安心・安全な診療空間。

足元に張り巡らされるケーブルは、診療中の事故の原因になる可能性を大いにひめております。足元からケーブルがなくなることで、患者さまの転倒のリスクを限りなく回避するとともに、車椅子における移動もスムーズに行うことが可能です。

自由なレイアウト。

オールコードレスにより、コンセント位置によるレイアウトの束縛をうけなくなりました。これにより設置場所を選ばず自由なレイアウトが可能となりました。理想的な診療室レイアウトをサポートいたします。

ハイパワーバッテリー・省電力

1日約360診をカバーする ハイパワーバッテリー

連続動作時間 60 分のハイパワーバッテリーを搭載。（待機時間は含まれておりません。）
1 回の診察にて、位置調整の為の上下動の合計を 10 秒と過程すると、
1 日約 360 診療をカバーすることが可能です。

10 秒 × 360 診 ÷ 3600 秒

節電モードでバッテリー長持ち

待機時間 30 秒で節電モードとなり、バッテリーの使用が停止いたします。このため、待機中にバッテリーを消費することはありません。

急速充電でストレスなし

バッテリー残量がなくなった状態から、約 6 時間で充電完了となります。診察終了後の充電により翌日の診察も快適に行うことが可能です。

緊急時に対応する安心機能

充電を忘れてしまった場合でも問題なし

万一、充電不足により、バッテリー残量が無くなってしまった場合は、従来通りの AC 接続により問題なくご使用いただけます。

バッテリー残量警告音で安心


バッテリー残量が残り僅かとなると、警告ランプおよび警告音にてお知らせいたします。（フットスイッチ操作時）
この為、残量を気にせず、診察に集中することが可能です。



診察をスムーズにする諸機能

高性能マルチアングル受信


患者椅子に 3 か所のマルチアングル受信システムを採用。フットスイッチからの信号をマルチアングルに受信が可能です。障害物に妨げられることなく、スムーズ、そしてストレスなく操作することが可能です。

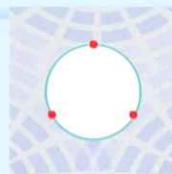

複数送信コードで誤作動防止

信号コードを 10 台まで持つことが可能です。複数台設置する場合にも送信コードを分けることで誤作動を起こすことなく、安全にご使用いただけます。

SPECIFICATIONS

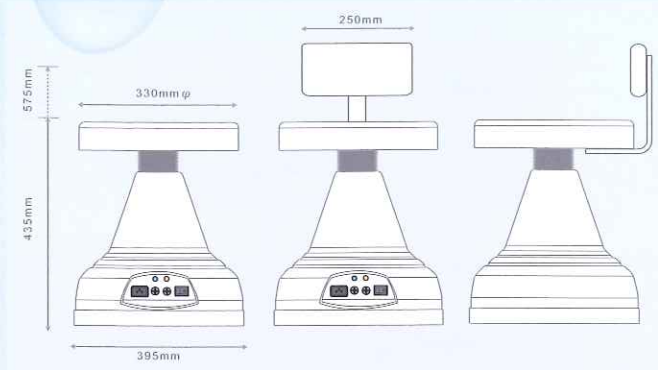

座面 / 330mmφ
幅 / W395mm
高さ / H435~575mm
上下ストローク / 140mm

作動方法 / 昇降装置付アクチュエーター
最大荷重 / 120kg
重量 / 18kg
定格電圧 / AC100V 50/60Hz
充電時間 / 8H 急速充電時間 / 6H
フットスイッチ / 単3電池×4本

K-1800

コードレス電動患者椅子 リバティス

標準色 L-2771

標準小売 ¥198,000



K-1575

電動丸座患者椅子専用腰あて

標準小売 ¥10,000

より安定した座り心地を提供する専用腰あて。



衛生面にも配慮

座面がフラットになっているため、EKC（はやり目）患者さまの診察の後など、アルコールでのふき取り作業などの消毒作業が素早く、そして確実に行えます。

安定したフォルム

患者さまにより安心して使用していただけるよう、脚部が安定感重視のシンプル設計となっております。また、軽量、シンプルでありながら最大荷重 120kg とパワフルな動力も備えています。



www.inami.co.jp/product/coordina/



「コルディナ」は各診療施設のイメージに合わせたカラーリングを 108 色のバリエーションからお選びいただける診療用ファニチャーブランドです。
ドクターと患者さまのコミュニケーションの場である診療空間で彩りをプラスしてみませんか？一歩先を行く空間マネジメントへ。私たちイナミがお手伝いします。



※カラーは一例です。裏面カラーチャート 108 色よりお選びいただけます。
（張替え手数料 ¥10,000）



製造販売業許可番号 13B1X00048



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

名古屋ベース：〒465-0094 愛知県名古屋市中東区亀の井3-208 TEL: 052-704-2173 FAX: 052-704-2174
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※ 本カタログ記載価格は、すべて2010年11月現在の税別標準小売価格となっております。

※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。