

主な特長

- より敏速な凍結/解凍
- スムーズなセットアップ
- シンプルな操作
- オートマチックパージシステム採用
- 標準ペンシルはエンドフリーズです。
- 排出ガス戸外放出機構付きです。
- ソフトタッチのフットスイッチ

本体パネルの説明

タイマー/ガス圧表示タッチキー（左より）

タイマーキー：押すと、自動パージ作動時間及びペンシル凍結経過時間のタイマーとして機能します。

PSI表示キー：押すと、ガス圧をPSI単位で表示します。

BAR表示キー：押すと、ガス圧をBAR単位で表示します。




温度表示

ペンシル先端の凍結温度を表示します。

ペンシル使用時の状況を表示します。

緑色の点灯⇒ペンシル使用可
緑色の点滅⇒パージ中
黄色の点滅⇒ペンシル凍結不十分
赤色の点灯⇒ペンシル接続不良
又はペンシル温度センサー不良
黄色の点灯⇒ガス圧超過

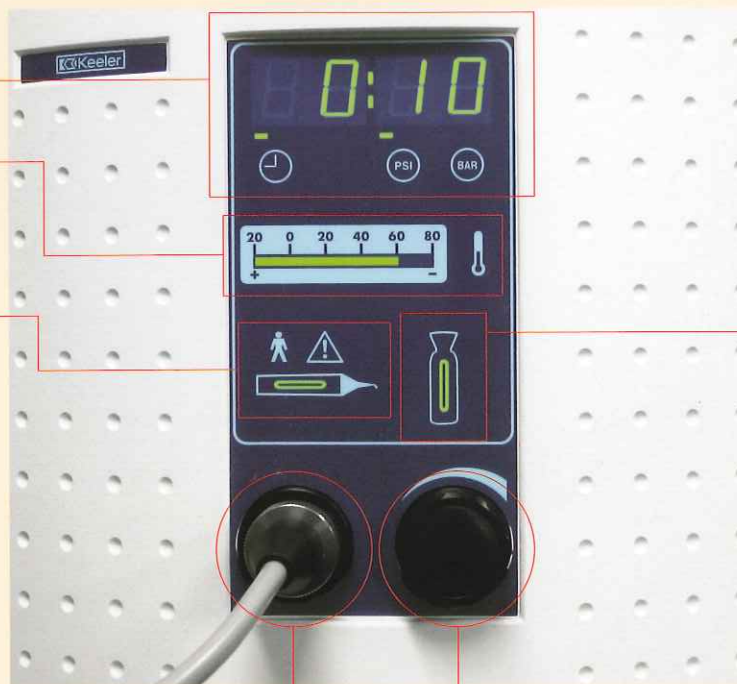

ガスボンベの圧力を表示します。

緑色の点灯⇒ボンベ圧正常
赤色の点灯⇒ボンベ圧不足
黄色の点灯⇒ガス圧超過

ペンシル接続口

ペンシルを本体接続し、ガス圧を適正処置圧に設定するだけで自動的にパージングが作動します。

※旧式クライオマスター用ペンシルは接続不可

ガス圧コントロールノブ

専用ペンシル

1 2508-P-8105

セット組用



網膜剥離用ペンシル
2.5mm スタンダード
(エンドフリーズ)

5 2508-P-8106



緑内障用ペンシル
3.0mm

2 2508-P-8102

セット組用



網膜剥離用ペンシル
2.5mm ロング

6 2508-P-8100

セット組用



硝子体用ペンシル
0.89mm
(エンドフリーズ)

3 2508-P-8109



網膜剥離用ペンシル
2.5mm × 5mm
マカマ型

7 2508-P-8101

セット組用



白内障用ペンシル
1.5mm
曲(エンドフリーズ)

4 2508-P-8103




網膜剥離用ペンシル
2.5mm
サイドフリーズ


8 2508-P-8112



乱生睫毛用ペンシル
4×10mm コリン式

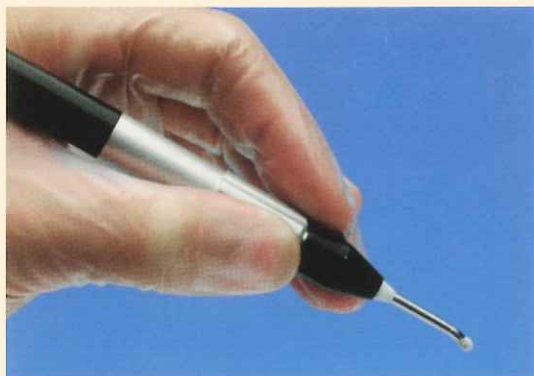

スムーズに凍結・解凍します。

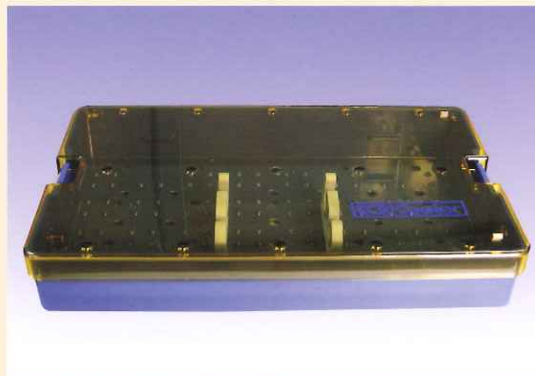

より安全に保管のできる滅菌用ケース
(MODEL 2508-P-8021)

商品構成

MODEL	商 品 名	詳 細
C-3000	クライオマスター 網膜剥離セットⅠ	クライオマスター本体、網膜剥離用ペンシルスタンダード1本、 滅菌用ケース1個、CO ₂ ボンベ、CO ₂ アダプター、高圧ホース、専用架台Ⅱ型
C-3100	クライオマスター 網膜剥離セットⅡ	クライオマスター本体、網膜剥離用ペンシル2本(セット組用)、 滅菌用ケース2個、CO ₂ ボンベ、CO ₂ アダプター、高圧ホース、専用架台Ⅱ型
C-3200	クライオマスター 網膜剥離・硝子体セット	クライオマスター本体、網膜剥離用ペンシルスタンダード1本、硝子体用ペンシル1本、 滅菌用ケース2個、CO ₂ ボンベ、CO ₂ アダプター、高圧ホース、専用架台Ⅱ型
C-3300	クライオマスター 網膜剥離・白内障セット	クライオマスター本体、網膜剥離用ペンシルスタンダード1本、白内障用ペンシル1本、 滅菌用ケース2個、CO ₂ ボンベ、CO ₂ アダプター、高圧ホース、専用架台Ⅱ型
2508-P-7004	クライオマスター本体	電源コード、フットスイッチ、スペアヒューズ、排気ホース

アクセサリ

MODEL	商 品 名	詳 細
2583-P-8029	高圧ホース	長さ1メートル
P-8003	専用架台Ⅱ型	ステンレス製 ボンベ縦置き(オーバートップ付)
CO ₂	炭酸ガスボンベ	容量7.5リットル
N ₂ O	笑気ガスボンベ	容量7.5リットル
2599-P-6052	炭酸ガスCO ₂ アダプター	高圧ホース/ヨーク式炭酸ガスボンベ接続具
2599-P-6044	笑気ガスN ₂ Oアダプター	高圧ホース/笑気ガスボンベ接続具
2508-P-8021	滅菌用ケース	滅菌・保管用ケース

仕様(本体)

寸 法	350mm×250mm×100mm
電源電圧	AC100V
周 波 数	50-60Hz
重 量	6kg
冷却用ガス	炭酸ガス(CO ₂)又は笑気ガス(N ₂ O)非サイフォン式ボンベ使用
推奨処置圧	フットスイッチを踏んだ時に700PSI(48bar)前後
最大処置圧	750PSI(51bar)

MODEL:C-3000



CE 0086

※改良のため仕様および外観は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

20040126-3000



株式会社 キーラー・アンド・ワイナー

〒113-0033

東京都文京区本郷3-35-3 本郷UCビル

TEL:03-3815-7787 FAX:03-5802-5931

e-mail:k-yna@wc4.so-net.ne.jp

ご用命は…