

ERBE VIO50C

高周波手術装置 VIO50C



- モノポーラ切開/凝固、バイポーラ凝固をサポートする5つのモード
- 外来処置の様々なニーズに対応
- 2つの出力設定を登録できるメモリー機能
- 優れたコストパフォーマンス

一般的電気手術器

ERBE

VIO50C



The VIO Compact unit
For Surgical Outpatient Practice

使用場所に合わせた選択

高周波手術装置 VIO Cシリーズ・VIO50Cは、モノポーラ切開、モノポーラ凝固、バイポーラ凝固を備えたシステムです。多様な外来処置や消化器内視鏡治療など、様々なニーズに応えます。必要に応じて出力設定プログラムを記憶させることができます。



オートカット

自動的に電圧を制御し、適切な出力を投与します。絶えずアクティブ電極と組織間の電圧を検知し、設定電圧を維持。電極、切開プロセス、患者組織の状態に関わりなく、壊死を最少に抑えた再現性の高い切開が可能です。



ドライカット

電圧制御と変調波形の組み合わせにより、強い止血力と発煙の少ない切開を得ることができます。出血を最小限に抑えた処置が可能です。



ドライカットでポリペクトミー

ドライカットモードは軟性内視鏡分野でも高い評価を受けております。5mm以下の小さなポリープ切除やホットバイオブシー手技では、出血を軽減させ確実な切開を行うことができます。



フォースド凝固

標準的な凝固モードです。素早く、効果的な処置を可能にします。一般的な止血処置に適しています。



バイポーラソフト凝固

バイポーラによる低電圧を用いた凝固モードです。組織と電極の付着や組織の炭化を防ぐことができます。



ソフト凝固

電圧が制御されたエルベ独自の凝固機能です。組織の炭化による電極と組織の付着が抑えられる確実な凝固を行うことが可能です。バイオプシー後の止血などに威力を発揮します。

設定のコツ

ソフト凝固モードは火花が出ない凝固モードです。熱による蛋白変性を利用して組織を凝固します。出力を高め設定することで短時間で蛋白変性が進行し、熱が深く浸達せず理想的な凝固ができます。



眼瞼形成



クモ状血管腫



ポリペクトミー

VIO C シリーズ 適応分野


皮膚科

眼科

美容形成外科

耳鼻咽喉科

内視鏡室

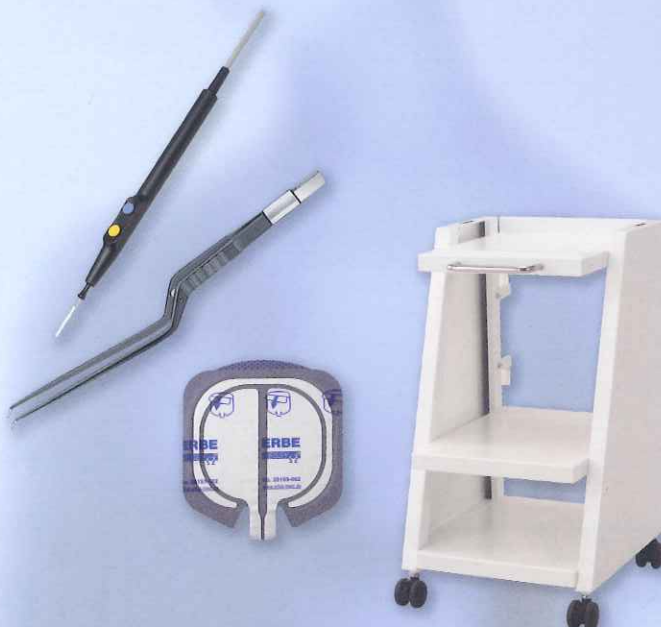



Endoscopy

●VIO50C本体 仕様・規格

項目	
	
寸法	280mm(W)×300mm(D)×130mm(H)
重量	4kg
電源	100V-240V、50/60Hz
消費電力	最大190W、スタンバイ時15W以下
電流入力	2A、スタンバイ時0.15A
電撃に対する保護	クラスI機器、CF形装着部
電磁両立性	IEC60601-1-2 適合
高周波漏れ電流	<150mA、絶縁出力方式
出力エラーモニタ	内蔵
対極板監視モニタ	0~120Ω
接続機能	接続口1：バイポーラアクセサリ専用
	接続口2：モノポーラアクセサリ専用
	接続口3：対極板専用
	フットスイッチ接続口：1個

項目	オートカット	ドライカット	ソフト凝固	フォースド凝固
高周波出力	50W	50W	50W	50W
波形及び周波数	非変調正弦波550kHz	パルス変調正弦波540kHz	非変調正弦波550kHz	パルス変調正弦波510kHz
最大ピーク電圧	510Vp	820Vp	180Vp	1200Vp

項目	バイポーラソフト凝固
高周波出力	50W
波形及び周波数	非変調正弦波550kHz
最大ピーク電圧	180Vp

●架台 仕様・規格

項目	
	
品名	VIO50C/100C用架台
ご注文番号	699-0002
寸法	360(W)×420(D)×650(H)mm
その他	キャスターφ50mm(前2つはブレーキ付) ケーブルホルダー×4

●フットスイッチ 仕様・規格

項目		
		
品名	VIO Cシリーズ専用 2ペダルフットスイッチ	VIO Cシリーズ専用 1ペダルフットスイッチ
ご注文番号	E12-0979	E12-0980
メーカーコード	20189-107	20188-102
その他	5mケーブル付 4ピン	5mケーブル付 4ピン

販売名：高周波手術装置 VIO C シリーズ
認証番号：222AIBZX00019000

●製造販売元



本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7
TEL: 03(3265)4263 FAX: 03(3265)2796

●製造元

独国 エルベ社

